


Schutzsocke

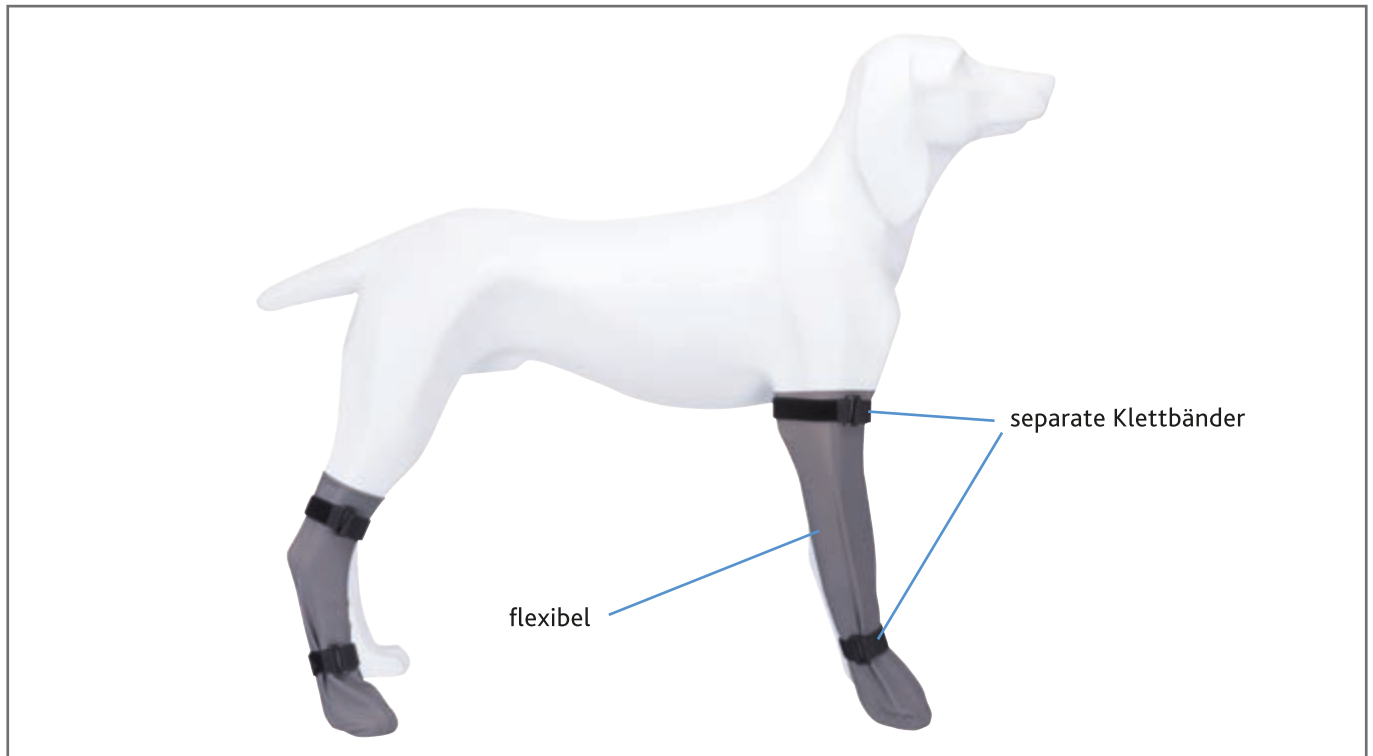

Anwendungszweck

hält Wunden und Verbände trocken und sauber, senkt das Infektionsrisiko und unterstützt so die Heilung

Produktinformation

- erhält die Bewegungsfreiheit
- einfaches Anpassen durch Zuschneiden
- #19431 auch für Katzen geeignet
- Material: Silikon, wasserdicht

Wichtige Hinweise

- Größenbestimmung: Messen Sie am stehenden Hund die breiteste Stelle der Pfote (Verbände berücksichtigen). Die Schutzsocke sollte ca. 1 cm breiter sein.
- Vorderbein: Einen Verschluss oberhalb der Daumenkrallen anbringen, den anderen am Abschluss des Strumpfes. Hinterbein: Einen Verschluss oberhalb des Zehengelenks anbringen, den anderen am Abschluss des Strumpfes.
- Die Klettverschlüsse nur so fest anziehen, dass eine ausreichende Blutzirkulation gewährleistet bleibt.
- Nicht verbissfest, nur unter Aufsicht verwenden.
- Luftdicht, nicht dauerhaft verwenden.
- Haltbarkeit bei stärkerer, nicht anwendungsbestimmter Nutzung nicht gewährleistet (z. B. freies Spielen, Laufen auf scharfkantigem Untergrund).

Art.-Nr.	Größe	Sockenbreite/länge	Inhalt	EAN
19431	S	6 cm/30 cm	1 St.	4 047974 194317
19432	M	8 cm/35 cm	1 St.	4 047974 194324
19433	L	10 cm/40 cm	1 St.	4 047974 194331
19434	XL	12 cm/45 cm	1 St.	4 047974 194348